

wir bewegen Ihr Leben
drive



bellavita
Vonios keltuvas

CE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

► Dėmesio!

Prieš naudodamai atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukciją!

- Prieš vonios liftą transportuodami įsitikinkite, kad atjungtas rankinis valdymas.

• Jei liftas buvo ilgą laiką laikomas žemoje temperatūroje (pvz., ilgai žiemą laikant transporto priemonėje), prieš naudodamai leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros, tai padės išvengti apgadinimo.

• Naudodamai vonios aliejus ar druską laikykite jų kiekio rekomendacijų – tokie produktai gali turėti įtakos skersinio judėjimui.

- „Bellavita“ valymui nenaudokite jokių acto pagrindu pagamintų ploviklių ar valikių!

► Pastabos dėl akumulatoriaus, akumulatoriaus įkroviklio ir rankinio valdymo:

• Rankinį valdymą naudokite tik vonios lifto valdymui.

• Vonios liftą reikia naudoti tik su originaliu, „Drive Medical“ pagamintu rankiniu valdymu.

• Niekada nemeskite rankinio valdymo į atvirą ugnį ir nelaikykite jo arti ugnies ar stiprių šilumos šaltinių.

• Rankinio valdymo neatidarinėkite. Tai padarius nustos galioti garantija.

• Akumulatorius įkrovimui naudokite tik komplekte esantį akumulatoriaus įkroviklį.

• Rankinio valdymo nenaudokite jei ant jo korpuso matyti apgadinimo ženkli.

• Akumulatoriaus įkroviklį naudokite tik sausose patalpose, ne vonioje. Įkroviklį naudokite tik komplekte esančio akumulatoriaus įkrovimui.

• Ypač svarbu prieš pirmą kartą naudojant „Bellavita“ pilnai įkrauti akumulatorių, po to ji reikėtų įkrauti po kiekvieno naudojimo.

► Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje!

Įrenginio nenaudojant ilgą laiką akumuliatorių reikėtų iškrauti kas 3 mėnesius, tai padės prailginti įrenginio tarnavimo laiką.

- I rankinio valdymo kištuko lizdą nekiškite jokių elektrai laidžių daiktų (pvz., adatų, metalinių smeigtukų, t. t.).
- Prieš valydamai akumulatoriaus įkroviklį visada ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Akumulatoriaus įkroviklį valykite tik sausa šluoste.
- „Bellavita“ akumulatoriaus įkroviklio ir akumulatoriaus konstrukcija yra tvirta, tačiau negalima leisti jų veikti mechaniniais smūgiais, pvz., nukritus. Pastebėjus bet kokius matomus ir/ar girdimus apgadinimo požymius, vonios lifto nenaudokite ir nedelsiant praneškite savo specializuotam platintoju. Rekomenduojama paskutiniame šių naudojimo instrukcijų lape nurodyti artimiausio jūsų atstovo adresą.
- Norédami gauti tolesnės informacijos, techninės informacijos ar adresų informacijos perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Kilus sutrikimams skaitykite šių naudojimo instrukcijų priede pateiktą mūsų „Trikčių šalinimo“ skyrių. Laikykites ten nurodytos informacijos ir instrukcijų. Dėl jūsų pačių saugumo vonios lifto nenaudokite kol nebus pašalinti bet kokie defektai ar sutrikimai.

Svarbios saugos taisyklės

- a) Visada atsiséskite lifto viduryje ir nugara atsiremkite į atlošą, laikykite kojas laisvai ištiestas į priekį ir laisvą ranką padékite ant vonios krašto arba sau ant kelių. Kitą ranką naudokite kėlimui ar nuleidimui liftu valdyti rankiniu valdymu.
- b) Liftą keliant ar nuleidžiant nedékite rankos tarp vonios krašto ir lifto ar po lifto sėdyne, kadangi tai gali sukelti sužalojimus.
- c) Asmenų su rimta ar protine negalia niekada negalima palikti vonioje be priežiūros. Vonioje be pagalbos maudykites tik jei tai jums leidžia jūsų sveikatos būklė, kitu atveju prašykite pagalbos.
- d) Prieš naudojant vonios liftą reikia išbandyti ar tinkamai veikia kėlimo, nuleidimo ir AVARINIO SUSTABDYMO funkcijos.
- e) Kilus sutrikimams vonios lifto nenaudokite ir prašykite savo specializuoto platintojo ištaisyti kilusią problemą.
- f) Nenaudokite jokių daiktų kurie naudojant vonios liftą galėtų užstrigti mechanizme (pvz., šepetėlių, t. t.)!

► Pastabos dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMC)

Šis produktas atitinka Tarybos Direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, soderinimo (EMV, IEC 60601-1-2) (89/336/EEB) nustatytus saugos reikalavimus. Tačiau negalima visiškai atmesti elektromagnetinių trikdžių atsiradimo tam tikromis sąlygomis galimybės, t. y., visų pirma, jei naudojami mobilieji telefonai ar kitokie elektriniai įrenginiai. Netoli vonios lifto nenaudokite jokių gyvybės palaikymui ar gyvybės gelbėjimui skirtų įrenginių ar kitokią įrenginių, kurie sutrikimų atveju keltų pavojų naudotojams.

Tokie įrenginiai tam tikromis sąlygomis gali būti veikiami elektrinių trikdžių, arba jie gali daryti neigiamą įtaką tinkamam vonios lifto veikimui. Aptikus bet kokius vonios lifto sutrikimus ar neįprasta veikima, ar netoli esant ar naudojant kitus elektrinius įrenginius, pasirūpinkite, kad vonios liftas nebūtų naudojamas ir praneškite savo specializuotam platintojui.

Surinkimas ir naudojimas

► Išpakavimas

Prašome patikrinti ar atsiustoje pakuotėje yra visas nurodytas turinys, joje turėtų būti tokios dalys:

1. Pavaros blokas su integruoitu atlošu ir rankiniu valdymu (su integruoitu akumulatoriumi)
2. Sédynė su šoniniais atvartais
3. Akumulatoriaus įkroviklis
4. Naudojimo instrukcijos
5. 4 x siurbtukai, 75 mm (2,95 in) skersmens, montuojami ant pagrindo Įrengimas ir naudojimas


Jei kurios nors iš šių dalių trūksta ar ji apgadinta, praneškite savo specializuotam platintojui.

Pirmiausiai išpakuokite įkroviklį, kitas dalis – po to. Pakuotę, kurioje prietaisas atsiuštas, galima pasilikti ateičiai (t. y. vonios lifto transportavimui ar laikymui).

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą rekomenduojama įkrauti akumuliatorių. Prašome sekti skyriuje „Akumulatoriaus įkrovimas“ pateiktą informaciją.

► Įrengimas vonioje pirmą kartą

1. Pritvirtinkite siurbtukus prie apatinės sédynės (pagrindo) pusės. Galinių siurbtukų liežuvéliai turi būti nukreipti į išorę – tai užtikrins geresnę prieigą norint išimti liftą iš vonios. Priekinių siurbtukų liežuvéliai įstumkite į priekinėje pagrindo pusėje esančius griovelius.

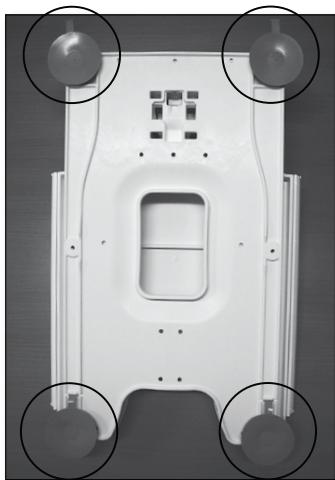

► Svarbi pastaba

Siurbtukai laiko vonios liftą pritvirtintą prie vonios dugno. Taigi apatinėje „Bellavita“ dalyje esantys siurbtukai turi būti švarūs ir sausi. Vonia taip pat turi būti sausa ir švari. Rekomenduojame siurbtukus ir vonią reguliarai valyti iprastomis valymo priemonėmis, kad būtų galima gauti geriausią įmanomą prisiurbimą.

2. Įsitikinkite, kad vonios dugnas tuščias ir švarus (jei reikia, išimkite neslidžius kilimėlius ir panašius daiktus).

3. Į tuščią vonią įstatykite sédynę su prie pagrindo pritvirtintais siurbtukais. Įsitikinkite, kad galiniai siurbtukai būtų netoli nuožulnaus vonios krašto.



Užtikrinti mažesniams
slidimui yra pridėti 2
papildomi siurbtukai.

Surinkimas ir naudojimas

4. Tada į sėdynės guolių įvores įstatykite pavaros bloką su integruotu atlošu (žr. pav.).




5. Tada laikykite atlošą už rankeną ir kitą ranką palenkite jį atgal (žr. pav.) kol pavaros blokas atsirems į pagrindą.



① Rankena

► **Dėmesio! Labai svarbu į guolių įvores įstatyti abu kaiščius!**

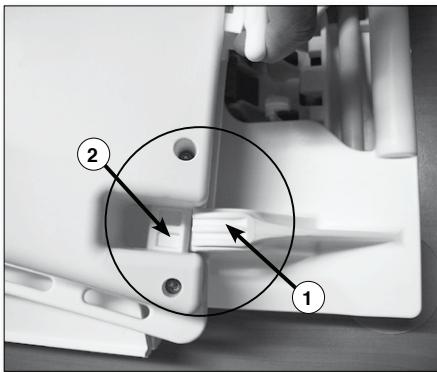


① Pavaros blokas ② Kaištis




Įsitikinkite, kad raudona sustabdymo rankena būtų tinkamoje padėtyje.

6. Prie vonios lifto prijunkite rankinį valdymą. Norėdami tai padaryti, prijunkite kištuką prie kiškinio lizdo kol jis užsifiksuos ir nebus matomas raudonas ant kištuko esantis žiedas. Vonios liftas dabar paruoštas judėjimui.

➤ **Pastaba:** Jei kyla atlošo susidūrimo su vonios galu rizika, patraukite pagrindą toliau nuo vonios galо.

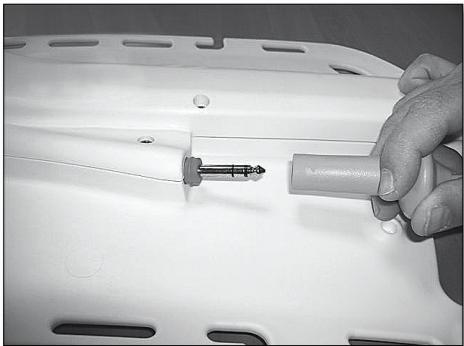

7. Įsitinkite, kad kėlimo strypas būtų fiksatoriuje įstatytas tinkamoje padėtyje.

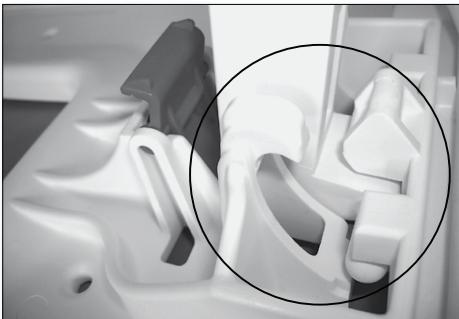

teisingai



neteisingai

Surinkimas ir naudojimas

Uždangalu tvirtinimas ir nuėmimas

Uždangalus galima lengvai pritvirtinti ir nuimti.

- Norédami pritvirtinti uždangalą uždékite jį ant atlošo paviršiaus ir įspauskite tvirtinimo segtukus į sédynės atlošo (ar sédynės ir šoninių atvartų, žr. pav.) korpuose esančias skyles.




Nugaros atramos užvalkalas



Nugaros atramos užvalkalas



Sédynės užvalkalas

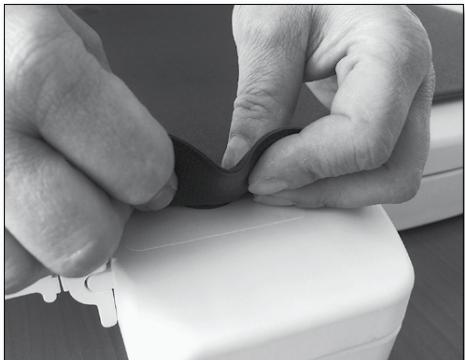



Sédynės užvalkalas

- Norédami uždangalus nuimti, dviem pirštai traukite už dviejų tvirtinimo segtukų; tada ištraukite juos.

Vonios keltuvą taip pat galima naudoti be uždangalu.

Galvos atramos (pasirenkama) įrengimas

Istatykite du galvos atramos strypus į atlošo korpuse viršuje esančias skyles. Galvos atramą galima be vargo reguliuoti iki norimo aukščio.

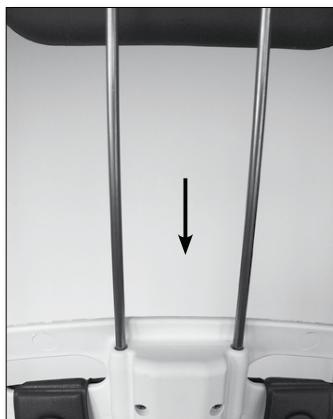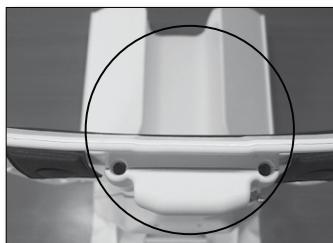

Surinkimas ir naudojimas

Rankinis valdymas

Priklasomai nuo vonioje besimaudančio žmogaus svorio, pilnai įkrauto akumulatoriaus įkrovos užtenka daugiausiai 6 maudymosi kartams. Maudymosi proceso metu dega žalia rankinio valdymo lemputė.

Akumulatoriaus įkrovos lygiui nukritus iki gamykloje numatyto lygio lemputės spalva pasikeičia į oranžinę ir lemputė pradeda lėtai mirksėti. Tai rodo, kad akumulatoriaus energijos liko dar vienam 1 (vienam) maudymosi vonioje kartui ir akumulatorių reikėtų įkrauti pagal naudojimo instrukcijose pateiktus nurodymus.

Toliau naudojant liftą lemputės spalva gali iš geltonos pasikeisti į raudoną ir pradėti greitai mirksėti. Šiuo atveju liftas gali tik pakilti į viršų siekiant užtikrinti, kad galėtumėte saugiai išlėpti iš vonios. **Tokiu atveju reikia nedelsiant įkrauti akumulatorių naudojant komplekteinant akumulatoriaus įkroviklį.**

ŽALIA lemputė: Liftas paruoštas naudoti.

ORANŽINĖ lemputė: Paruošimas naudoti yra ribotas – pakaks dar vienam (1) maudymosi vonioje kartui. akumulatorių reikėtų įkrauti.


RAUDONA lemputė: Lifto naudoti nebegalima – liftas judės tik į viršų. Reikia nedelsiant įkrauti akumulatorių.

• AVARINIO IŠJUNGIMO mygtukas (raudonas):

Kilus avarinei situacijai reikia nutraukti višas vonios lifto funkcijas paspaudžiant AVARINIO IŠJUNGIMO mygtuką. Norédami iš naujo suaktyvinti liftą, dar kartą paspauskite žalią ĮJUNGIMO mygtuką.


Vonios liftas automatiškai išsijungia praėjus maždaug 30 minučių. Norédami ji išjungti rankiniu būtu paspauskite raudoną rankinio valdymo mygtuką (lemputė nustos žibeti).

- ① Nuleidimo mygtukas (mėlynas)
- ② AVARINIO IŠJUNGIMO mygtukas (raudonas)
- ③ Lemputė (LED)
- ④ Kėlimo mygtukas (geltonas)
- ⑤ Įjungimo mygtukas (žalias)

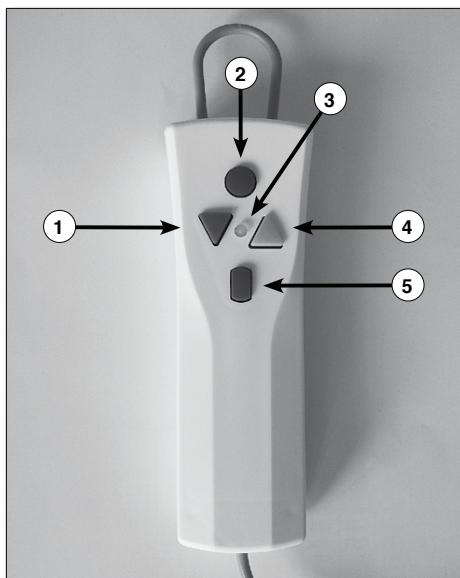

„Bellavita“ naudojimas vonioje

1. Prieš naudodamis vonios liftą įsitikinkite, kad rankinis valdymas tinkamai kištuku prijungtas prie vonios lifto. Raudono ant kištuko esančio žiedo turi nesimatyti. Paspauskite rankinio valdymo IJUNGIMO mygtuką (žalią). Užsižiebs šalia lemputė.

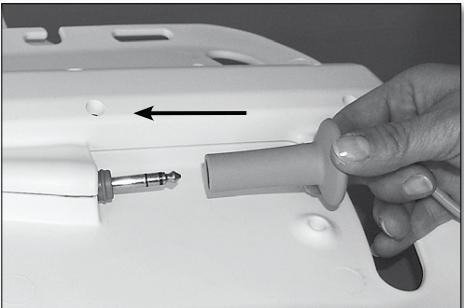


2. Tada paspauskite KĖLIMO mygtuką (geltoną). Pirmiausiai atlošas pereina į vertikalią padėtį; tada liftas kyla iki galinės padėties ir yra automatiškai išjungiamas. Liftą galima kelti iki bet kokio tarpinio aukščio atleidžiant mygtuką kai pasiekiamas reikiama aukštis.

3. Išskleiskite šoninius atvartus kol jie atsirems į vonios kraštus. Kelkite sėdynė tol, kol jos paviršius bus vonios kraštų lygyje ir šoniniai atvartai bus horizontalioje padėtyje.

► **Svarbu: Šoniniai atvartai turi atsiremti į vonios kraštų paviršių.**

4. Atsisėskite ant lifto. Jei be pagalbos to padaryti negalite, prašykite pagalbos.

5. Norėdami nuleisti vonios liftą paspauskite NULEIDIMO mygtuką (mėlyną). Liftas nuleidžiamas kol pasiekia galinę padėtį, tada automatiškai atlenkiamas atlošas. Galinėje padėtyje pavara išsijungia automatiškai. Tačiau atlošą galima atlenkti ir į tarpinę padėtį tiesiog pasiekus reikiamą kampą atleidžiant mygtuką.

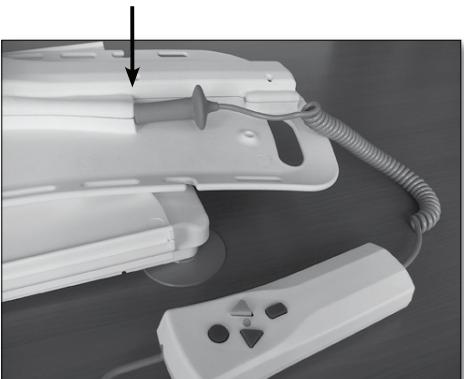

► **Dėmesio! Nedelsiant atleiskite mėlyną mygtuką jei atlošas remiasi į vonios galą!**

Surinkimas ir naudojimas

6. Išsimaudžius vonioje paspauskite rankinio valdymo KÉLIMO mygtuką (geltoną) norédami pakelti liftą į patogų aukštį (daugiausiai iki viršutinės galinės padėties).

Pasirūpinkite, kad šoniniai atvartai neužstrigtų už vonios montažo ar rankenų.

7. Dabar išsimaudęs žmogus gali išlipti iš vonios pasislinkdamas į šoną nuo sėdynės paviršiaus.

„Bellavita“ automatiškai išsijungia praėjus maždaug 30 minučių. Norédami vonios liftą išjungti rankiniu būti paspauskite raudoną rankinio valdymo mygtuką (lemputė nustos žibeti).

► Pastabos:

Judėdami aukštyn ar žemyn atsiremkite į atlošą ir laikykite rankas ant kelių.

Jei liftas turi būti paliekamas vonioje, atjunkite rankinį valdymą, kad nebūtų iškraunamas akumuliatorius.

► Keltuvo nuémimas nuo vonios


Naudodami rankinį valdymą pirmiausiai nuleiskite liftą į apatinę padėtį ir leiskite atlošui atsilenkti iki galinės padėties, kol pavara sustos galinėje padėtyje. Išsitinkite, kad atlošas nesiliečia prie vonios sienelės. Atjunkite rankinį valdymą.

1. Suskleiskite šoninius atvartus, kad jie atsiremtų į sėdynės paviršių.

2. Naudokite pavaros bloko rankenas norédami atlenkti pavaros bloką.



3. Visada įsitikinkite, kad kėlimo strypas yra visiškai sutrauktas.

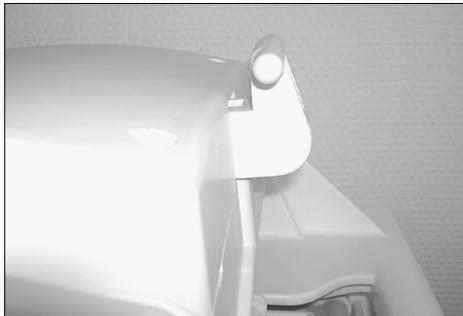

teisingai



neteisingai

4. Tada galima rodyklės kryptimi (žr. pav.) nuimti pavaros bloką nuo sédynės.

➤ **Pastaba:** Pavaros bloką nuimti galima tik tam tikru kampu. Kai jis visiškai suskleistas ir užfiksotas nuo sédynės jo nuimti negalima. Atlenkite atlošą į pav. nurodytą padėtį; tada nuimkite pavaros bloką rodyklės kryptimi.

5. Traukdami už liežuvėlių atkabinkite du galinius siurbtukus. Tada pakelkite galinę pagrindo dalį. Šis veiksmas padės atlaisvinti priekinius siurbtukus, kurie yra savaimė prisivirtinančios. Tada sédynę galima išimti iš vonios.



► Vonios lifto techninė priežiūra

„Bellavita“ turi guolius, kuriems techninės priežiūros ar tepimo nereikia.

Periodiškai techninę vonios lifto apžiūrą reikia atlikti bent kartą per 12 mėnesių. Šis patikrinimas apima vizualių visų dalių, ypač apkrovą laikančių dalių, apžiūrą. Jis taip pat apima reikiamus funkcinius bandymus. Apžiūros metu nustatius bet kokius defektus, nusidévėjimą ar kitokius apgadinimo požymius, kurie gali turėti įtakos vonios lifto saugumui, jo naudoti negalima tol, kol defektai nebus ištaisyti. Visus apžiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas ir tinkamai apmokytas personalas, turintis pakankamai žinių ir praktinės patirties, leidžiančių tinkamai atlikti tokius su sauga susijusius darbus. Toks kvalifikuotas personalas turi išlikti nepriklausomas nepaisant atliekamų bandymų ar apžiūros.

Prašome dėl periodinės apžiūros kreiptis į savo vonios lifto specialistą.

Reikiamus atsarginių dalių sąrašus ir dokumentaciją jums gali suteikti jūsų vonios lifto specialistas.

Prašome remonto darbus patikėti tik įgaliotiemis specializuotiemis platintojams.

► Dėmesio: Rankinį valdymą atidaryti gali tik vonios lifto gamintojas!

► Valymas

Norint išlaikyti vonios liftą nepriekaištingos būklės ji reikia nedelsiant valyti po kiekvieno naudojimo (pageidautina nuplauvant ji karštu vandeniu). Atdžiai nuvalykite vonios liftą dušo galvute po kiekvieno naudojimo.

Norédami nuvalyti vonios liftą (be uždangalu) naudokite įprastas dezinfekavimo priemones ar vonios valikius.

► Sėdynės uždangalu priežiūra

Dėl savo lygaus paviršiaus ir antibakterinių savybių nuimamą uždangalu medžiaga yra labai higieniška.

Uždangalus reikia reguliarai valyti skalbiant rankomis arba skalbimo mašinoje, 60 °C (140 °F) temperatūros vandenyje. Biologiškai aktyvių valiklių su jokiais fermentų priedais nenaudokite. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant vonios aliejus ar kitus aliejų savo sudėtyje turinčius priedus gali pakisti uždangalu spalva. Spalvos pakitimas taip pat gali pasireikšti jei uždangalai néra reguliarai valomi.

► Pastaba: Uždangalu spalva kinta dėl įprasto nusidévėjimo, todėl garantija jiems netaikoma.

- Norint valyti uždangalus galima labai lengvai nuimti.
- Uždangalu džiovintuve nedžiovinkite, kabinkite juos at skalbinių virvės.
- Be to, rekomenduojama naudoti įprastas dezinfekavimo priemones.
- Prašome laikytis gamintojo nurodytų instrukcijų!

► Naujų vonios lifto pagalvélės kištukų surinkimas

Pirmiausiai prakiškite pagalvélės kištuką pro pagalvéléje esančią skyllę (iš viršaus į apačią); tada įspauskite ji į apatinėje pusėje uždėtą poveržlę.



● Akumulatoriaus įkroviklio techninė priežiūra

Įkrovikliui tech. priežiūros nereikia. Korpusą reikia valyti tik naudojant švelnius valiklius, kuriuose nėra tirpiklių, arba tiesiog drėgna šluoste. Saugokite, kad į įkroviklio korpusą nepatektų skysčių! Prieš vėl naudodami įkroviklį visada išsitinkite, kad jis visiškai sausas. Jei reikia, prieš junkdami jį į elektros lizdą laikykite prietaisą sausoje, védinamoje vietoje.

► **Dėmesio:**Prieš valant akumulatoriaus įkroviklį būtina ji išjungti iš elektros lizdo (visada ištraukite maitinimo kabelio kištuką).

● Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš naudodami išsitinkite, kad akumulatorius pilnai įkrautas! Įkroviklio įtampa turi būti suderinama su jūsų elektros tinklo įtampa. (pvz., 220 V – 240 V Europoje ir 110 V JAV).



1. Prijunkite įkroviklio kištuką prie rankinio valdymo spiralinio kabelio lizdo kol kištukas užsifiksuos.

2. Ikiškite akumulatoriaus įkroviklio maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą. Akumulatoriaus įkrovimo metu žibės raudona rankinio valdymo lemputė, įkrovus akumulatorių jos spalva pasikeis į žalią. Jei norite pilnai įkrauti akumulatorių, palikite ji prijungtą prie įkroviklio. Akumulatoriaus įkroviklio valdymo blokas nutrauks įkrovimo procesą praėjus maždaug 4 val. Tai apsaugo akumulatorių nuo per ilgo įkrovimo.

3. Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

4. Atjunkite akumulatoriaus įkroviklio kištuką nuo rankinio valdymo lizdo.

► Svarbi informacija

- Jei prijungus rankinį valdymą lemputė neužsižiebia, patikrinkite: – Sujungimus (ar kištukas įkištas į įkrovimo lizdą iki galo?)

- Norėdami apsaugoti akumulatoriaus įkroviklį nuo vandens ir drėgmės naudokite jį tik uždarose patalpose. Akumulatoriaus įkroviklio nenaudokite vonioje.

► Pastaba:

- **Jei akumulatoriaus įkroviklis apgadintas, perduokite jį tiekėjui, kad būtu apžiūrėtas.**

Transportavimas

Naudodami ne vienoje vietoje laikykités šiuu instrukcijų:

1. Atjunkite rankinį valdymą nuo vonios lifto ir juos transportuokite atskirai.

2. Transportuojant visada saugokite vonios liftą nuo slidinėjimo ar mechaninio poveikio (pvz. automobiliuje).

3. Jei akumuliatorius buvo laikomas žemoje temperatūroje (pvz., žiemą laikant automobiliuje), visada leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros, jei reikia, įkraukite.

4. Keliant prietaisus atkeipkite dėmesį, kad sédynė sveria maždaug. 5,5 kg (12,1 lb), o pavaro blokas (be rankinio valdymo) sveria maždaug. 3,8 kg (8,37 lb)

Galima transportuoti kaip du atskirus daiktus

Sédynę ir pavaro bloką galima lengvai transportuoti naudojant paémimui dviejim rankomis skirtas rankenas.



Vientiso prietaiso transportavimas

Vonios liftą galima transportuoti kaip vientisa prietaisa, sujungtoje padėtyje.



Bendrosios naudojimo sąlygos

Bendras ilgis (su nugaros atrama sédéjimo pozicijoje)	apie 830 mm
Bendras plotis (su šoninėmis atramomis)	apie 700 mm
Sédynés plotis	apie 350 mm
Sédynés gylis	apie 420 mm
Bendras sédynés ilgis	apie 570 mm
Minimalus sédynés aukštis	apie 60 mm
Maksimalus sédynés aukštis	apie 480 mm
Nugaros atramos aukštis	apie 640 mm
Nugaros atramos plotis	apie 320-360 mm
Nugaros atramos posvyrio kampus	10°- 50°
Atraminės plokštės plotis	apie 310 mm
Atraminės plokštės ilgis	apie 560 mm
Maksimali apkrova	140 kg
Bendras svoris (be rankinio valdymo pulto)	9,3 kg
Bendras svoris (su rankinio valdymo pultu)	9,7 kg
Rankinio valdymo pulto svoris (su baterijomis)	0,4 kg
Pakėlimo/nuleidimo trukmė	apie 50 s esant apkrovai
Darbinė įtampa	12 V
Akumulatorius (ličių jonų)	12 V / 1,3 Ah įkraunama
Automatinis išjungimas	maksimaliai 30 min
Galia	90 W maksimaliai 12 V
Saugumo klasė	IP X7

Bendrosios naudojimo sąlygos




- Naudojimo aplinkos temperatūra:

Temperatūra	+ 10° C iki + 50°C
Santykinė oro drėgmė	10 iki 100%
Oro slėgis	700 hPa iki 1060 hPa

- Transportavimo ir laikymo aplinkos sąlygos:

Temperatūra	- 10° C iki + 40°C
Santykinė oro drėgmė	10 iki 100%
Oro slėgis	700 hPa iki 1060 hPa
Garso slėgio lygis	54 dB A

Priedas

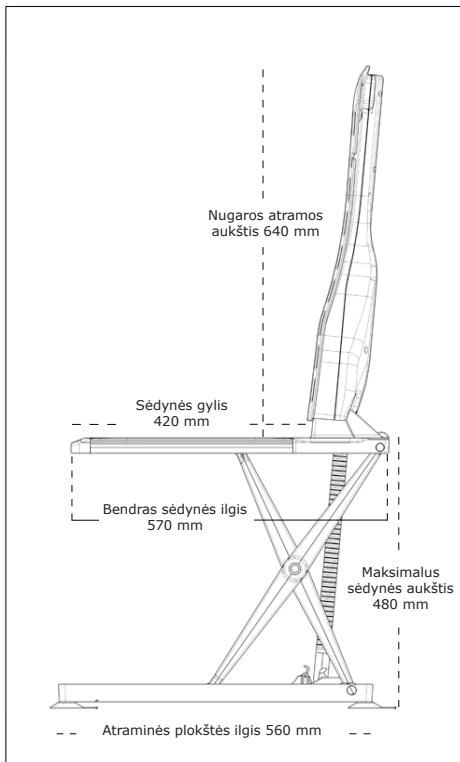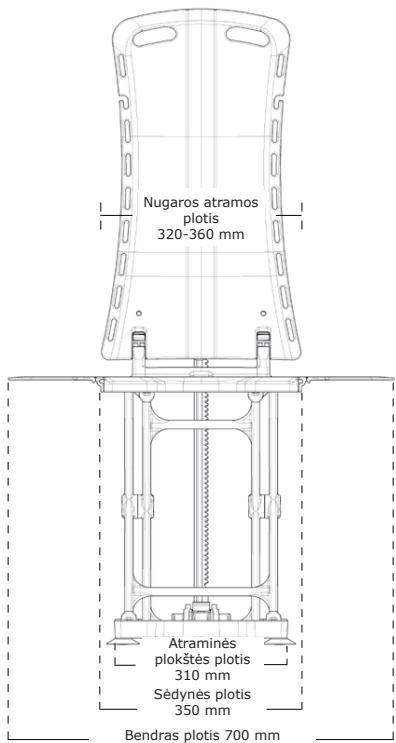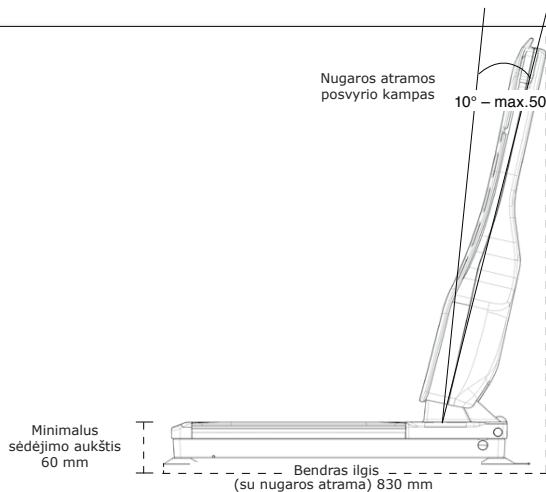

Trikdžių diagnostika ir šalinimas

Trikdis	Galima priežastis	Sprendimas
Liftas nejuda	<ul style="list-style-type: none"> - Išsikrovęs akumulatorius - Užteršti rankinio valdymo kontaktai - Rankinis valdymas tinkamai neprijungtas 	<ul style="list-style-type: none"> - Įkraukite akumulatorių - Atjunkite rankinių valdymą; nuvalykite kontaktus ir prijunkite rankinių valdymų vėl - Patirkinkite kištukinį sujungimą
Liftas kelis kartus sustoja	<ul style="list-style-type: none"> - Išsikrovęs akumulatorius - Per didelę kėlimo apkrovą - Kištukas neįkištas iki galio 	<ul style="list-style-type: none"> - Įkrāukite akumulatorių - Sumažinkite kėlimo apkrovą (žr. maks. kėlimo galia, žr. vonios lifto etiketę su duomenų lentele) - Patirkinkite kištukinį sujungimą
Akumulatorius neįsikrauna	<ul style="list-style-type: none"> - Nejungta į elektros lizdą - Užteršti kontaktai 	<ul style="list-style-type: none"> - Įkiškite akumulatoriaus įkroviklio maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą - Nuvalykite kontaktus sausa šluoste
Rankinis valdymas tinkamai neveikia	- Kištukas neįkištas iki galio	- Įsitikinkite kad kištukas įkištas iki galio

Svarbi pastaba dėl trikčių šalinimo:

Jei laikantis visos aukščiau nurodytos informacijos vonios lifto vis tiek naudoti neįmanoma, susisiekite su savo specializuoti plaitintoju, pas kurį įsigijote prietaisą.

Gamintojas:



Oficialus atstovas Lietuvoje: UAB Kasko Group

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 52167425 • Faks. +370 52167425

www.kid-man.eu • info@kid-man.eu

Data 2017-05-17

Paskutinio atnaujinimo data 2017-05-17



CE